

PRENATALA PROVER

Förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. Om provet inte kommer Klinisk genetik tillhanda inom 24 timmar bör det förvaras i kylskåp. Får ej frysas. Förvaras ej över 37° C. Inför långhelg, kontakta lab. tel 031-343 4192.

Amnionvätska: Sterilt rör utan tillsats, 10 ml, gärna 2 rör om möjligt. Önskas både kromosomanalys och annan analys behövs 2 rör.

Chorionvilli: Rör med odlingsmedium, beställs från laboratoriet 031-343 4192.

Fibroblastbiopsi från foster (t ex hälsena): Rör med odlingsmedium, beställs från laboratoriet 031-343 4192, alternativt sterilt rör med fysiologisk NaCl – då särskilt viktigt med snabb leverans.

EDTA-blodprov från moder för eventuell kontroll av maternell kontamination bör bifogas.

BLODPROV FÖR NIPT-ANALYS

Blodprovet måste tas i Streck™ Cell-Free DNA BCT-provrör, beställs i VGR via Marknadsplatsen art.nr 114385081. För lyckad analys är det mycket viktigt att anvisningarna nedan följs noggrant! För instruktionsvideo, se streck.com/mixing.

Provtagare tar ett 10 ml blodprov i Streck BCT-rör (Streck™ Cell-Free DNA BCT-rör) med Vacutainer.


OBS: använd absolut EJ butterfly eller annan nål med vidhängande slang vid provtagning!

OBS: måste vara minst 7 ml blod i röret!

OBS: vänd omedelbart röret upp och ner 8-10 ggr försiktigt och långsamt med handen (ej på vagga, får ej skakas):

OBS: Streck BCT-rör ska **förvaras och transporteras i rumstemperatur!**

Notera datum och klockslag för provtagning på remissen. Skicka NIPT-prov med bud till Klinisk genetik. Provet måste nå laboratoriet i god tid för att hinna hanteras inom 48 timmar från provtagningen. Streck BCT-rör för NIPT-analys kan tas emot måndag-torsdag kl 8.00-16.00.

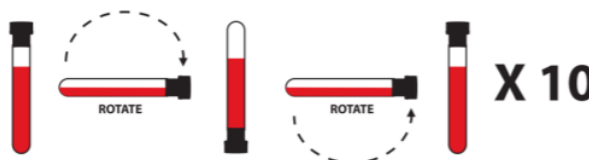

SKICKAS TILL

Prover/brev via post: Klinisk Genetik
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

Prover med kurir: Klinisk Genetik
Medicinaregatan 3 B
Våning 5, rum 5121
413 90 Göteborg

Telefax 031-84 21 60

E-post klinisk.genetik@vgregion.se

Sekreterare (allmänna frågor, även prover):

031-343 42 06

Dagjour (läkare, enbart för vårdpersonal):

031-343 57 70