


Provtagning av saliv med GBO Saliva Collection System



Provtagningskit

- 1 st salivbägare med överföringsanordning (Greiner Bio-One, art.nr: 881212)
- 1 st salivextraktionsrör med blå kork (Greiner Bio-One, art.nr: 881112)
- 1 st salivöverföringsrör med orange kork (Greiner Bio-One, art.nr: 881117)

VGR-provtagare beställer kitet från Marknadsplatsen (se nederst på sidan). Övriga beställer från Hettich Labinstrument AB (Greiner Bio-Ones nuvarande underleverantör), se hettichlabinstrument.se.

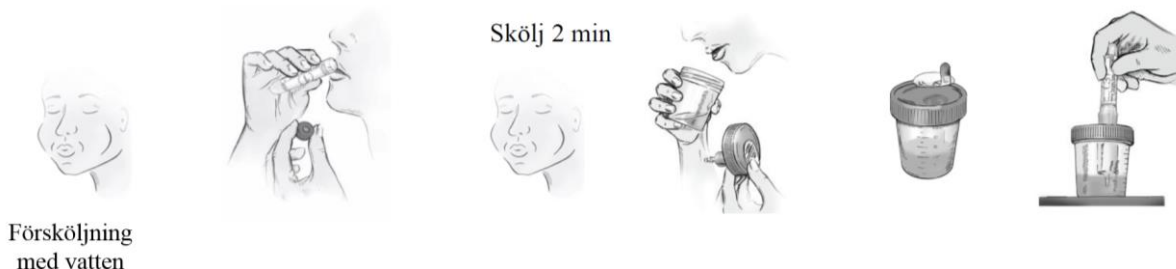

Försköljning
med vatten

Följ instruktionerna – korrekt provtagning är en förutsättning för tillförlitliga analysresultat

1. Kontrollera patientens identitet. Håll patienten under uppsikt under alla provtagningsmoment. Ta provet innan eventuell peroral medicinerings med substans som ingår i analysen (eller i andra hand minst en timme efter peroralt medicinintag).
2. Låt patienten skölja munnen med vatten innan provtagningen (helst 10 min innan, t ex före patientsamtal). Var observant på att patienten därefter inte intar något eller har något i munnen.
3. Öppna extraktionsröret och låt patienten skölja munnen med den gula vätskan i två minuter.
4. Vätskan spottas ner i salivbägaren. Sätt på locket men stäng det inte helt. Ta av lockets pappersetikett.
5. Tryck ner överföringsröret (med orange propp) på nålen i salivbägaren för att suga upp vätskan i röret. Om vätskan inte sugs upp, backa burkens skruvlock så att luft släpps in eller öppna röret och håll ner vätskan. Vänd röret några gånger. Minsta provvolym är 1,5 mL (se gradering på rörets sida).
6. **Viktigt!** Märk röret nogga med personnr, analys, provtagningsdatum och beställare. [Länk med mer info.](#)
7. Skicka provet till Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg. Skicka helst provet inom ett dygn, annars förvara kylt. Kyltransport till laboratoriet är inte nödvändigt men transporten bör inte ta mer än ett dygn. Emballaget ska vara markerat med biologiska prover kategori B (UN3373).
 - VGR-provtagare: Prover och ev. remiss skickas med ordinarie provtransport alternativt som internpost. Prover som skickas med internpost ska packas i transporthylsa och transportpåse/transportlåda (se förslag nederst på sidan).
 - Extern provtagare: Skicka prov och remiss med post. Se Folkhälsomyndighetens anvisningar [Packa provet rätt](#) (se folkhalsomyndigheten.se). Exempel på godkänd paketering för leverans med normal postgång är transporthylsa och vadderat kuvert alternativt ytterlåda av kartong med prov i innerpåse med uppsugande material.
8. Salivbägaren sorteras som *Smittförande* och *Skärande/Stickande*.

För VGR-provtagare – artikelnummer till Marknadsplatsen

Salivbägare m. överföringsanordning.	200000989	Lock till avfallskärl	110193935
Saliv extraktionsrör m. blå kork 4ml	200000971	Transporthylsa	200000937
Saliv överföringsrör orange kork 3,5ml	200000982	Transportlåda (kartong)	102796364
Avfallskärl (25L)	110193901	Transportpåse (vadderad)	102764404

ID: KKAP0205, Version; 1.7, Publiceringsdatum: 2023-01-20, Sida 1 (1)

www.sahlgrenska.se