

TURP-material (prostatachips)

Remiss	PAD remiss kan fyllas i och skrivas ut. Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” REMISS PAD Sahlgrenska sjukhuset
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.
Fixering	Allmänt gäller att preparatet ska läggas i 4% fosfatbuffrad formaldehydlösning. Mängden formaldehyd skall vara 5-10 gånger större än provets volym.
Utförande	Provet läggs i fixeringslösning så fort som möjligt. Detta är av stor vikt för att undvika artefakter vilka försvårar den mikroskopiska bedömningen.
Övrigt	På remissen skall materialets vikt (g) anges.
Kontakt	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet. All extern transport som utförs av Transportcentral SU/Mölndal sker enligt ADR-S 6.2. Godsdeklaration skall medfölja. Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 I annat fall förvaras fixerade prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle. Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning. Hur prov skall förpackas se ” Packa provet rätt ”, information från Folkhälsomyndigheten.