

Provtagningsanvisningar Patologi

TUR-material

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Remissanvisningar ” REMISS PAD Sahlgrenska sjukhuset
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.
Fixering	Allmänt gäller att preparatet ska läggas i 4 % fosfatbuffrad formaldehydlösning. Mängden formaldehyd skall vara 5-10 gånger större än provets volym.
Utförande	För säkrare bedömning av invasion är fraktionering av resektionsmaterialet i huvudprov och tumörbas önskvärt.
Övrigt	---
Kontakt	Patologens provinlämning tel. 031- 342 15 16
Transport	<p>Proven kan sändas per post, skickas med intertransport eller lämnas direkt på laboratoriet. All extern transport som utförs av Transportcentral SU/Mölndal sker enligt ADR-S 6.2. Godsdeklaration skall medfölja.</p> <p>Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 I annat fall förvaras fixerade prov i rumstemperatur tills nästa transporttillfälle.</p> <p>Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till laboratoriepersonal vid provinlämning.</p> <p>Hur prov skall förpackas se ”Packa Provet Rätt”, information från Folkhälsomyndigheten.</p>