

Testisbiopsier i Bouins lösning

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Remissanvisningar ” ” PAD-remiss Allmän ”
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskär/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskär inte får märkas på lock.
Fixering	Bouins lösning OBS! provet får inte ligga i fixeringsvätskan längre än 4 timmar
Utförande	Lägg provet i Bouins lösning, <u>notera fixering och klockslag på remiss</u> och lämna till patologen inom 4 timmar. Alternativt Lägg i Bouins lösning. Fixera provet i 2-4 timmar, <u>notera fixeringstid på remiss</u> . Efter fixeringen för över provet till 70% alkohol, <u>notera detta på remiss samt klockslag</u> . Lämna provet till patologen senast dagen efter.
Övrigt	Bouins lösning kan erhållas från Histolab Products AB tel. 031-7093030
Kontakt	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16 eller Uro-sektionen 0700-52 34 30
Transport	Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.